



concept

ACCESSORI PER LA SINTERIZZAZIONE

- P302-1** TAZZA MULLITE small Ø 80 H40mm
P302-1-C COPERCHIO TAZZA small
P307-1 TAZZA ALLUMINA large Ø94 H30mm
P307-1-C COPERCHIO TAZZA large
P306-1 TAZZA ALLUMINA large Ø100 H40mm
P306-1-C COPERCHIO TAZZA large



FOTO INDICATIVA
NELL'IMMAGINA TAZZA CON TACCHE

P311 MICROSFERE IN ALLUMINA

Due le version disponibili: con tacche o completamente chiuse. Utilizzate con il coperchio, assicurano una maggiore protezione della struttura in sinterizzazione. In questo caso si consiglia di aumentare la temperatura di sinterizzazione, perchè la tazza stessa assorbe calore. O meglio, la prima volta, misurare la temperatura all'interno della tazza con gli anelli ceramici THERMO CHECK RING (art. P300)

Istruzioni d'uso

Tazze realizzate in materiale refrattario ad alto tenore di Allumina (97%).
Resistenza termica 120°C.

Si tratta di materiale molto sensibile e qualsiasi shock termico potrebbe causare la rottura della tazza e/o del coperchio.

Evitare ogni forma di shock termico

- Prima dell'utilizzo, si consiglia un giro a vuoto nel forno.
- Non appoggiare la tazza direttamente sul piano del forno, ma posizionarla in modo che l'aria possa circolare anche nella parte sottostante.
- Estrarre dal forno a temperature < 80°C.
- Non appoggiare su piani freddi.

Nota: La tazza potrebbe presentare una colorazione leggermente rosata. Questo non ha alcuna influenza sul pezzo da sinterizzare.